

# Инструкция

## по сбору волос

для исследования содержания наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ

CHROMOLAB



Золотой стандарт  
лабораторной диагностики

## Подготовка к исследованию

- Перед проведением процедуры волосы необходимо тщательно вымыть и высушить.
- Сбор волос рекомендуется проводить в медицинском офисе у специалиста.
- Перед самостоятельным сбором волос необходимо тщательно вымыть руки и продезинфицировать ножницы спиртосодержащими средствами.

## Сбор биоматериала


- Волосы срезаются отдельными пучками ближе к коже головы отдельно с лобной (1), теменной (2), затылочной (3), правой и левой височных областей (4) волосистой части головы.
- Длина отстриженных волос должна составлять не более 5-6 см от корней.
- Отстриженные волосы собрать в пучки диаметром, равным сложенным вместе 2-3 спичкам.
- Необходимо собрать не меньше 1 гр волос.
- Биоматериал поместить в бумажный конверт, зип-пакет или стерильный герметичный контейнер.
- Указать ФИО, пол, возраст, дату сбора (личные данные пациента регистрируются в Лабораторно-Информационной Системе в том случае, если сбор биоматериала проводится в медицинском офисе).

Зоны сбора

Образец

длина  
5-6 сантиметров,  
а толщина пучка  
волос – 2 спички

Непригодно  
для использования

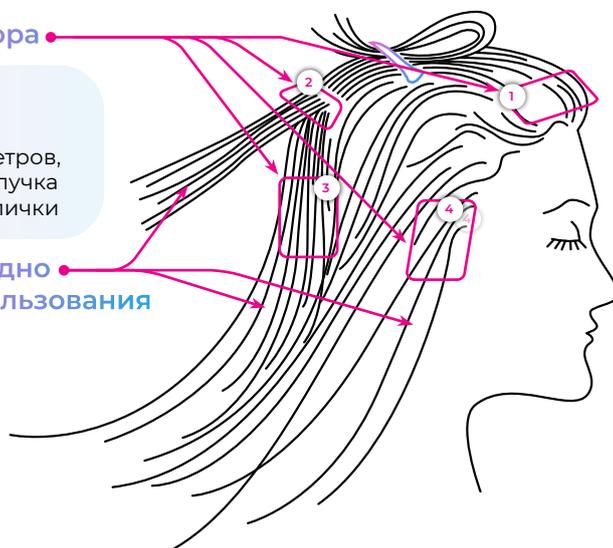

## Хранение и транспортировка

Условия хранения и транспортировки биоматериала соответствуют температуре окружающей среды.

## Ограничения

Доставка в пластике, фольге или любом другом материале, кроме указанного выше **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**. Для исследования принимаются **ТОЛЬКО** образцы с волосистой части головы.

Соблюдение рекомендаций напрямую влияет на результат исследования.